

Ülevaade glükomeetrist




Sümbolite ülevaade




Veateated

- [- 1] Testriba valesti / osaliselt sisse lükatud, testriba välja tõmmatud ja ei ole uuesti sisse lükatud
- [- 2] Võõra süsteemi kodeerimiskiip
- [- 3] Kodeerimiskiip mitteloetav, võõra süsteemi kodeerimiskiip
- [- 4] Mõõtmisava määrdunud, testriba on paindunud / ei asu otse ja lamedalt
- [- 5] Kasutatud testriba sisse lükatud, mõõtmisava määrdunud, testriba valesti / osaliselt sisse lükatud
- [- 7] Veri või kontroll-lahus liiga vara peale kantud, testriba paindunud / kohalt liikunud, tugev elektromagneetiline kiirgus
- [- 8] Kodeerimiskiip mõõtmise ajal välja tõmmatud
- [- 9] Testriba paindunud / kohalt liikunud, testriba valesti / osaliselt sisse lükatud
- EEE Viga
- Errr Peale kantud liiga vähe verd või kontroll-lahust
- ttt Liiga madal või liiga kõrge temperatuur mõõtmisel


Kodeerimine

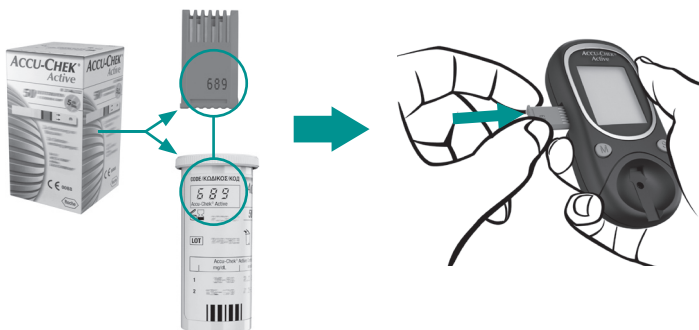

Veresuhkru mõõtmine

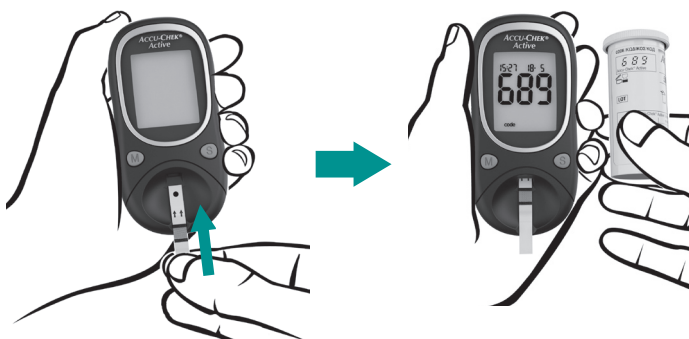


Veretilga asetamine testribale väljaspool glükomeetrit. Soovi korral võite siis, kui ekraanil vilgub testriba ja veretilga sümbol, võtta testriba glükomeetrist välja ning seejärel veretilga värvilisele padjale asetada. Nüüd on teil ca. 20 sekundit aega panna veretilk.

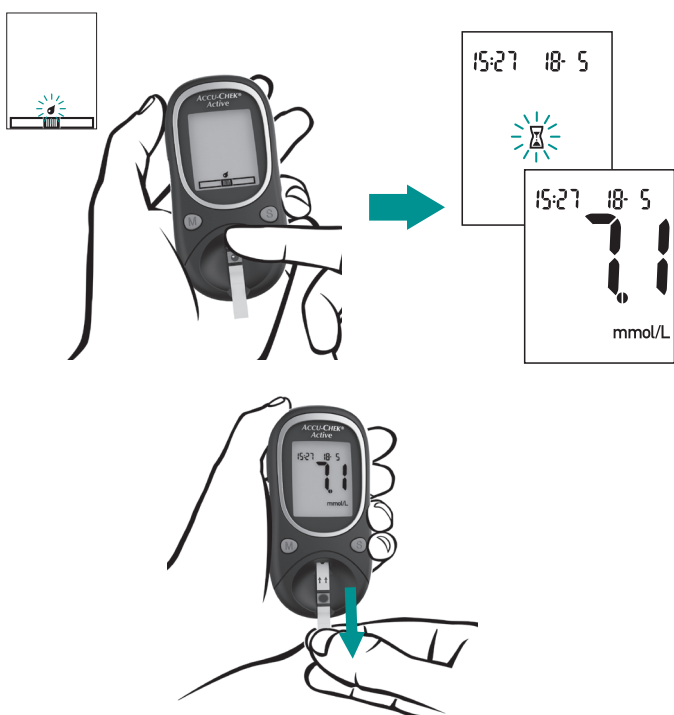

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Glükomeetri sisselülitamine: **S** vajutada kauem kui 3 sekundit.

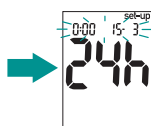

Glükomeetri väljalülitamine: **M** + **S** korraga lühiajaliselt vajutada.

Seadistuse muutmine: **M** vajutada või hoida vajutatult.



Kinnitada muutmist ja minna järgmise seadistuse juurde:

S vajutada lühikest aega.

Seadistuste järjekord

