

Lugege
enne kasutamist

ACCU-CHEK® Performa

Esmakasutaja juhend

Teretulemast Accu-Chek toodete perekonda.



Need esmakasutaja juhised ei asenda Accu-Chek Performa aparadi kasutaja voldikut. Palun lugege kindlasti ka kasutaja voldikus sisalduvaid ohutusjuhiseid.


Õnnitleme Teid otsuse puhul võtta oma diabeet kontrolli alla. Esmakasutaja juhised aitavad Teil süsteemi seadistada ja teostada esimene mõõtmine. Mõõtmise teostamine kontroll-lahusega veendumaks, et süsteem on töökorras peaks olema osa Teie rutiinist. Lisainformatsiooni vaadake kasutaja voldikust "kontrollmõõtmine" alt. Kasutaja voldik sisaldab ka rohkem informatsiooni süsteemi lisavõimaluste ja mõõtmistulemuste mõistmise kohta.

1 Sisestage testiriba



Veenudge, et aparaat on välja lülitatud. Lülitage aparaat välja. Pöörake koodikiip ümber nii, et koodi number jääb kiibi alumisele küljele ning seejärel lükake see kiibi avasse kuni takistus ette tuleb.

VAHETAGE KOODIKIIP IGA KORD UUE TESTIRIBADE KARBI AVAMISEL.

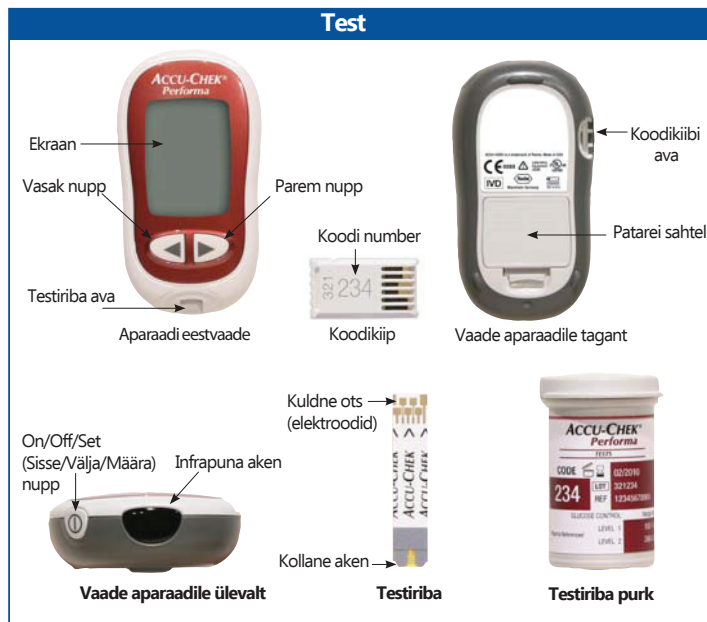



2 Määrake kuupäev ja kellaaeg - esmakordne kasutamine



vähendamine



suurendamine

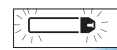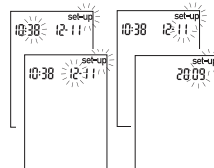



1. Vajutage nupule ja vabastage see aparadi sisse lülitamiseks. Kellaaeg ja kuupäev ilmuvad ekraanile. "Set-up" ja tunni näitajad vilguvad.
2. Vajutage ja vabastage või nupp vastavalt tunni näitaja suurendamiseks või vähendamiseks. Hoidke nuppe all kiiremaks edasi liikumiseks.
3. Tunni märkimiseks vajutage nuppu ja seejärel vabastage see. Minuti näitaja hakkab vilkuma.
4. Korra etappe 2 ja 3 märkimaks minutid, päev, kuu ja aasta. Vilkuv näitaja on see, mida parasjagu muuta saate.
5. Kui olete määranud aasta, siis hoidke nuppu all kuni vilkuva testiriba sümboli ilmuniseni.

MÄRKUS: Teie uus aparaat saabub sisestatud patarei ja eelnevalt määratud kuupäeva ja kellaaega. Võimalik, et Teil on vaja kohandada kellaaega vastavalt oma ajavööndile. Korrektsed kellaaeg ja kuupäeva määramine on oluline kui kasutate aparadi mälu või soovite tulemusi arvutisse laadida.

3 Veresuhkru mõõtmise teostamine



1. Valmistage ette lansett.
2. Peske ja kuivatage käed. Võtke testiriba purgist üks testiriba. Sulgege purk korralikult.
3. Sisestage testiriba aparati vastavalt noolemärgistele. Aparaat lülitub sisse.
4. Veenduge, et ekraanile ilmuv kood vastab testiriba purgil olevale koodile. Kui Te ei märganud koodi numbrit, siis võtke testiriba välja ja sisestage uuesti aparati.
5. Kui veretilga märgis vilgub, siis võtke näpu otsast tilk verd. Teistest piirkondadest võetud vere testimiseks vaadake lisainformatsiooni kasutaja voldikust.
6. Pigistage õrnalt sõrmeotsa, et aidata kaase vere voolamisele. See aitab Teil vere tilk kätte saada.

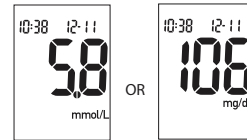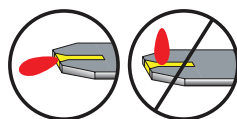

7. Puudutage veretilga testiriba kollase akna äärega. Ärge pange veretilga testiriba peale.
8. Kui näete vilkuvat liivakella kujutist, siis on testiribal mõõtmiseks piisav kogus verd.
9. Pärast tulemuse ilmnemist visake kasutatud testiriba minema.

Pärast mõõtmise teostamist

1. Vaadake kasutaja voldikust lisainformatsiooni diabeedi, oma aparadi ja testitulemuste kohta.
2. Parima võimaliku klienditeeninduse tarvis täitke ja postitage oma garantiikaart.

CE 0088

AS Surgitech
Pirita tee 20, maja T
10127 Tallinn, Estonia
tel. +372 6460660
fax. +372 6460661
www.surgitech.ee

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK PERFORMA are trademarks of Roche.
©2008 Roche Diagnostics. All rights reserved.
04722370002-1208

